



ReLax 趨動程式刪除步驟

一、如何刪除趨動程式


- (一) 將 ReLax 感測器連結控制器後插入電腦 USB 插槽，點選 “開始” 功能鈕 → “控制台” → “裝置管理員”。

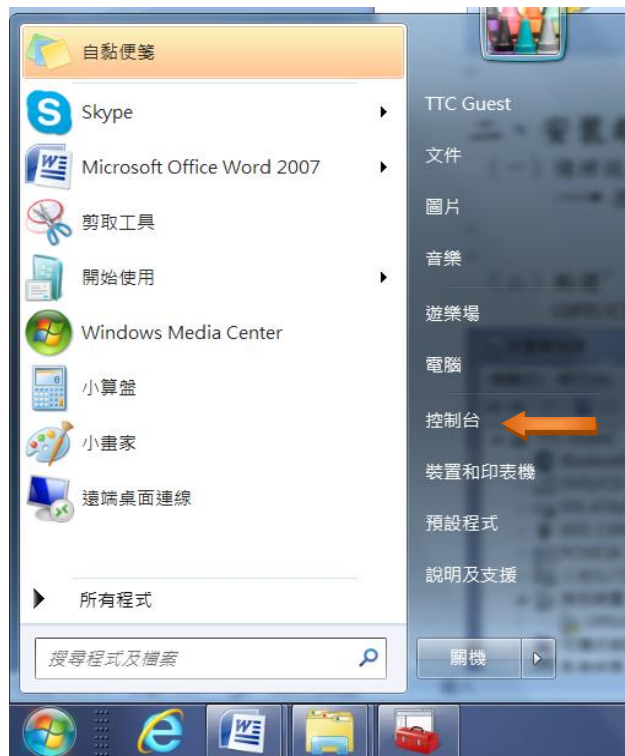

- (二) 點選 “連接埠 (COM 和 LPT)” 前的三角形。

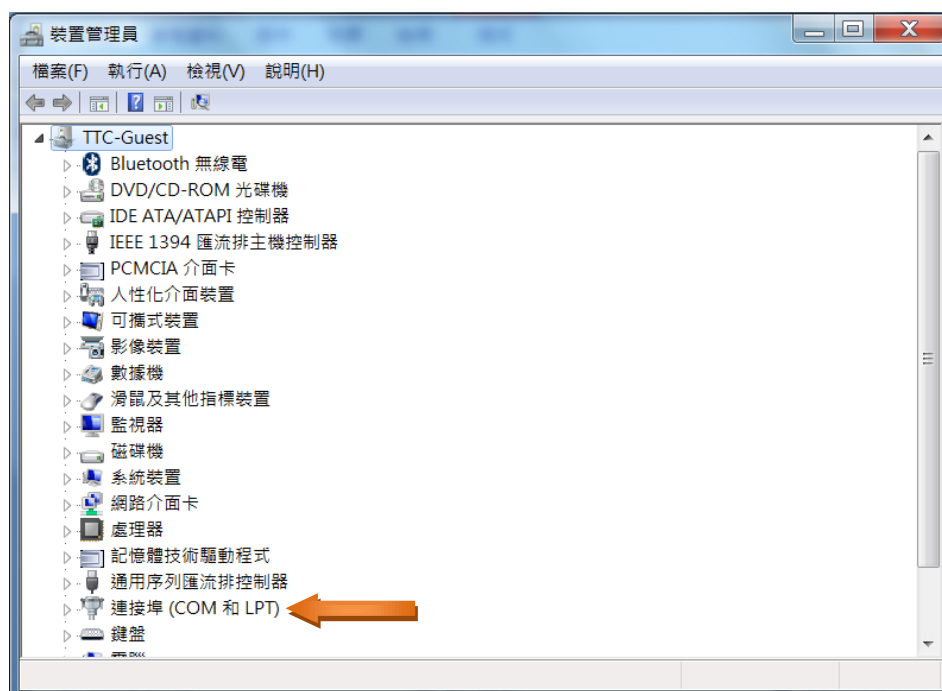

(三) 點選 “Communicaiton Device Class ASF example” 快擊二下。

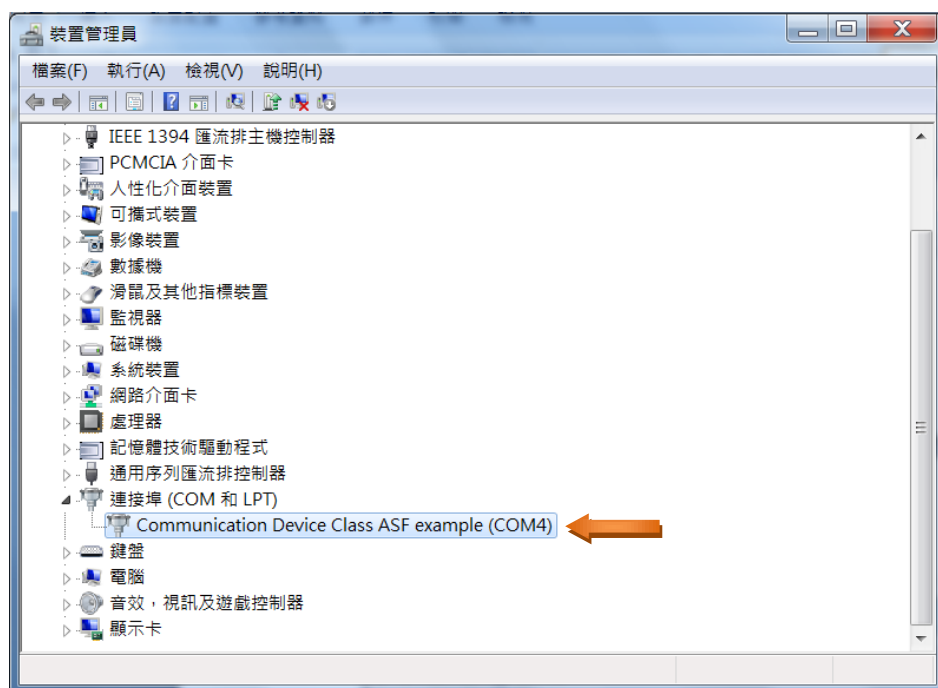

(四) 出現下列畫面，點選“趨動程式”→“解除安裝”→“確定”。



(五) 勾選“刪除此裝置的驅動程式軟體”→“確定”，完成刪除作業。



(六) 完成刪除後，在“裝置管理員”內即看不到該裝置了。

